

Rolator cu 3 roti mode RX143 Montaj, utilizare, intretinere



M

Montare manere de sprijin

Cele doua manere de sprijin (3) se introduc in locasurile de la partea superioara a scheletului de otel (7). Se alege inaltimea optima, se aliniaza perechea de gauri din schelet cu una din perechile de gauri de pe maner, se introduce surubul din interior catre exterior prin toate cele 4 gauri, se insurubeaza piulita fluture (4), conf figura de mai jos



Inaltimea optima: utilizatorul in picioare, la verticala, intre manerele de sustinere, acestea trebuie sa fie pozitionate aproximativ in dreptul fiecarei incheieturii de la maini.

Plierea rolatorului cu 3 roti

Se ridica cosul de depozitare (6) si se inlatura, astfel avem acces la mecanismul de blocare (5)



se ridica in sus maneta dispozitivului de blocare (5) si se apropie intre ele rotile din spate. In acest mod latimea rolatorului se reduce in pozitia pliat. Rolatorul este pregatit pentru transport sau depozitare.

Deplierea rolatorului cu 3 roti

Se indeparteaza rotile din spate una fata de cealalta pana la distanta maxima admisa, se apasa in jos maneta mecanismului de blocare (5), se fixeaza cosul de depozitare pe cele 2 carlige de sustinere. Rolatorul este gata de utilizare.

Franele rolatorului

Rolatorul are doua frane (2) cate una pentru fiecare roata din spate, blocandu-le prin intermediul sabotilor de frana (8)

Franarea pentru oprire

In timp ce impingeti rolatorul cu mainile sprijinite pe manerele (1) daca trageți cu degetele in sus parghiile franei (2) acestea vor bloca rotile si rolatorul se va opri. Daca eliberam parghiile (2) acestea revin in pozitia initiala si rolatorul va putea fi deplasat din nou

Frana de siguranta

Daca stationati o perioada oarecare de timp trebuie sa asigurati rolatorul sa nu se deplaseaza accidental. Pentru aceasta apasati amandoua parghiile (2) in jos, apare un punct in care efortul trebuie sa fie ceva mai intens dupa care parghiile (2) raman in jos iar rotile sunt blocate permanent. Cand doriti sa va reluati deplasarea ridicati parghiile (2), rotile se vor debloca.

Intretinere : praful, impuritatile, noroiul se indeparteaza cu o carpa umeda eventual cu o solutie de sapun lichid, se sterge cu o carpa uscata. Depozitati rolatorul in locuri uscate, se poate plia pentru a economisi spatiul. Inspectati periodic componentele rolatorului daca prezinta avarii sau uzura avansata. Nu folositi rolatorul care are componente defecte, va periclitati siguranta.